

SIEMENS



Ušní tvarovka

Údržba a čištění

Ušní tvarovka je individuálně zhotovená ušní vložka k závěsnému sluchadlu. Zhotovuje se podle přesného otisku ucha a není možné použít jinou osobou.

Pokud je tvarovka správně nasazena, zajišťuje svému uživateli pohodlné nošení sluchadla a zároveň snižuje riziko zpětné akustické vazby (pískání). Při nesprávném nasazení může tvarovka tlačit nebo způsobit pískání sluchadla.

Pokud si sami měníte hadičku, dodržujte správnou délku. Příliš krátká hadička způsobuje nepříjemný tlak na tvarovku, sluchadlo může pískat a také způsobit otlak ucha. Příliš dlouhá hadička špatně drží sluchadlo za uchem, hadička se může zalomit a zablokovat přenos zvuku.

Výrobce:

Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany
Phone: +49 9131 308 0

Distribuce a servis:

Sivantos s.r.o.
Molákova 576/11
186 00 Praha 8
Tel.: +420 257 328 161

Sivantos GmbH je držitelem licence pro použití ochranné známky Siemens AG.





Správné nasazení do ucha



Špatné nasazení do ucha

Čištění a údržba tvarovky

1




Uchopte pevně hák sluchadla a opatrně stáhněte tvarovku s hadičkou. Odpojení od sluchadla je nezbytně nutné, sluchadlo nesmí přijít do styku s vodou!

2



Odpojenou tvarovku s hadičkou vložte do nádoby s čistícím roztokem alespoň na 15 minut

3

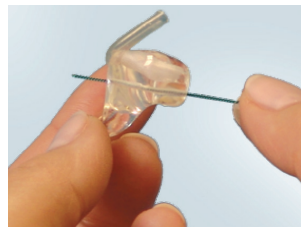

Pokud hadička a případně i odvětrávací kanálek (vent) zůstaly ucpané ušním mazem, použijte speciální tyčinku se štětečkem. Nikdy nepoužívejte k vyčištění párátko, špendlíky a jiné špičaté předměty, ani nestrkejte do tvarovky vatu.

4

Opláchněte tvarovku pod vlažnou tekoucí vodou.

5



Tvarovku osušte měkkým hadříkem, hadičku a vent vysušte pomocí speciálního balónku. Před nasazením na sluchadlo musí být tvarovka s hadičkou dokonale suchá. Nefoukujte hadičku ústy, v hadičce zůstává vlhkost.

6

Hadičku s tvarovkou nasadíte na sluchadlo.

Jestliže je hadička stará, ztvrdlá či uvolněná, vyměňte ji za novou. Tuto službu Vám nabízíme i v našem servisu, kde si také můžete nechat vyčistit tvarovku v ultrazvukové lázni.

Pokud Vám tvarovka již nesedí dobře v uchu a sluchadlo píská, mohl se Vám změnit tvar zvukovodu. V takovém případě je nutné nechat si zhotovit tvarovku novou.